

## ¿Necesita ayuda? Estamos a su disposición



Llámenos:  
1-888-822-8469



Envíenos un correo:  
help@caresimple.com



Más información:  
www.caresimple.com

**CareSimple™**

Fabricado para:  
BodyTrace, Inc.  
3505, El Camino Real  
Palo Alto, CA 94306  
USA

Para toda urgencia médica, llame al 911.

© 2021 CareSimple Inc. Todos los derechos reservados. CareSimple es un nombre comercial de CareSimple Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son marcas y nombres comerciales de sus respectivas empresas.

## ¿Mensaje imprevisto?

Nota: Este es un subconjunto del total de los códigos de error. Le rogamos utilice el "Manual del usuario" para más información.

**Er 1** Las baterías de su aparato le queda poca vida. Por favor, replácelas con 4 baterías de tipo AA.

**Er 7**

**Er 2** Su lectura fue interrumpida a causa de un movimiento. Por favor, evite hablar o moverse mientras toma las medidas.

**Er 2**

**Er 4** Su aparato no puede conectarse a la red de su celular. Desplácese hacia otro sitio, en una planta superior o cerca de una ventana.

**Er 4**

**Er 5**

**Er 6**

**Er 20** Enchufe el tubo del brazalete profundamente en el aparato; asegúrese que el aire no se escape. Si necesario, saque el tubo y vuelva a enchufarlo para arreglar el problema.

**Er 20**


**Er 22**

- Para uso individual únicamente. Si comparte el aparato, enviará valores erróneos a su doctor.
- Este aparato ha sido configurado para transmitir información a través de una conexión celular segura a CareSimple, a la cual tendrá acceso directo su doctor.
- Le rogamos utilice el "Manual del usuario" para obtener instrucciones más detalladas 1) sobre su utilización, sobre las contraindicaciones y sobre las precauciones; 2) códigos de error detallados; 3) información para resolver problemas; 4) especificaciones detalladas; 5) información sobre su almacenamiento y su mantenimiento, así como 6) información sobre las leyes aplicables y sobre las instrucciones del fabricante.

**CareSimple™**

# Saludos,

## ¿Cómo empezar a utilizar su nuevo monitor de presión arterial?

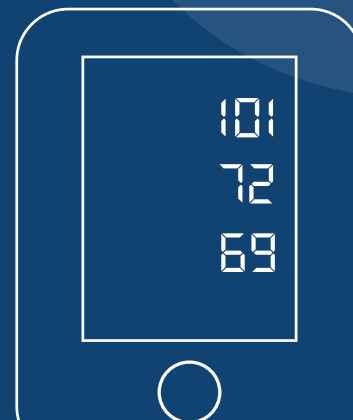

## Manténgase conectado con su doctor, desde el confort de su hogar.

Este aparato le ha sido enviado por su doctor. Tome su presión a diario o incluso más a menudo, según le haya sido recomendado.


Ser entiende que, al utilizar su monitor de presión arterial, usted acepta compartir los resultados con su doctor.



## ¿Listo?


### 1. Baterías

Abra el compartimento que contiene las baterías del aparato. Inserte cuatro (4) baterías de tipo AA, que vienen incluidas.

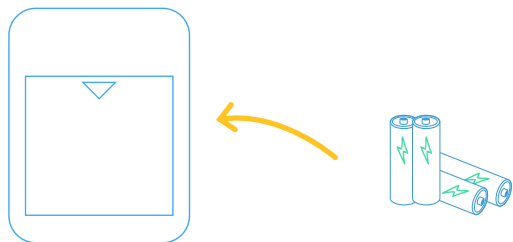

### 2. Conecte el brazalete

Enchufe el tubo del brazalete profundamente en el aparato; asegúrese que el aire no se escapa.

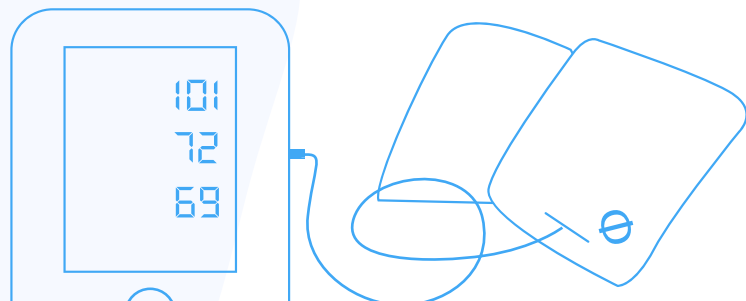

## Preparado...

### 3. Siéntese

Siéntese de manera confortable, con sus pies apoyados en el suelo. Descubra su brazo, quitándose cualquier tipo de ropa que lo cubra.

### 4. Coloque el brazalete



Abra el brazalete completamente y pase su brazo a través del círculo, con la palma del brazo hacia arriba.

Coloque el brazalete una pulgada más arriba del codo; el signo  $\Phi$  debe situarse en el centro de su brazo.

## ¡Vamos!

### 5. Relájese y mida la presión


Se recomienda que descanse durante 15 minutos antes de tomarse la presión. Ponga su brazo en la mesa con la palma hacia arriba. No se mueva y apoye sobre el botón que dice START/STOP.

Una vez que aparezcan los resultados, el brazalete se desinfla automáticamente. Entonces aparecerá en la pantalla una sección sombreada indicando la manera en que los resultados son enviados a su doctor.

Resultados en pantalla



Resultados enviados

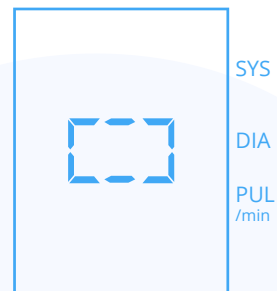

¿Desea hacer más?

**Descargue nuestra aplicación gratuitamente.**



Busque "CareSimple" en App Store o bien en Google Play store.



App Store



Play Store

Esta aplicación es opcional y le permite:

- Comunicarse con su doctor
- Consultar los resultados
- Ver su plan de cuidados