

¿Necesita ayuda? Estamos a su disposición



Llámenos:
1-888-822-8469



Envíenos un correo:
help@caresimple.com



Más información:
www.caresimple.com

CareSimple™

Fabricado para:
BodyTrace, Inc.
3505, El Camino Real
Palo Alto, CA 94306
USA

Para toda urgencia médica, llame al 911.

© 2021 CareSimple Inc. Todos los derechos reservados. CareSimple es un nombre comercial de CareSimple Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son marcas y nombres comerciales de sus respectivas empresas.

¿Mensaje imprevisto?

Nota: Este es un subconjunto del total de los códigos de error. Le rogamos consulte <https://help.caresimple.com> para obtener más información.

Er 1

Las baterías de su báscula les queda poca vida. Por favor, replácelas con 4 baterías de tipo AA.

Er 4

Er 5

Er 6

Su báscula no puede conectarse a la red de su celular. Desplácese hacia otro sitio, en una planta superior o cerca de una ventana.

Si necesita ayuda, comuníquese con Soporte.

- Para uso individual únicamente. Si comparte el aparato, enviará valores erróneos a su doctor.
- Este aparato ha sido configurado para transmitir información a través de una conexión celular segura a CareSimple, a la cual tendrá acceso directo su doctor.
- Mantenga su aparato seco para evitar accidentes/resbalones.
- No deje su aparato en temperaturas extremas o a la luz solar directa.
- Al manipular las baterías, siga las instrucciones del fabricante.

CareSimple™

Saludos,

¿Cómo empezar a utilizar su nueva báscula de peso?

0.0



Manténgase conectado con su doctor, desde el confort de su hogar.

Este aparato le ha sido enviado por su doctor. Tome su peso diario o incluso más seguido, según le haya sido recomendado.


Se entiende que, al utilizar su báscula, usted acepta compartir los resultados con su doctor.

¿Listo?

1. Baterías

Dé la vuelta a su báscula y localice el compartimiento de la batería.

Inserte cuatro (4) baterías de tipo AA, que vienen incluidas.

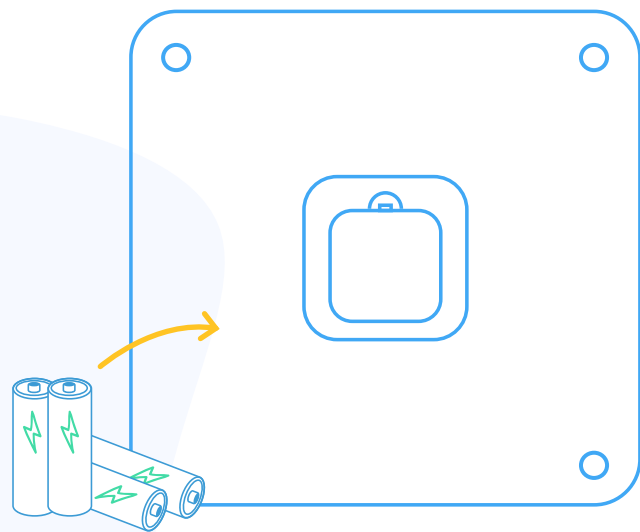


Preparado...

2. Quítese la ropa

Quítese los zapatos y la ropa pesada.

3. Despiértese

Para activar su aparato, toque el centro de la plataforma con un pie hasta que vea guiones en la pantalla.

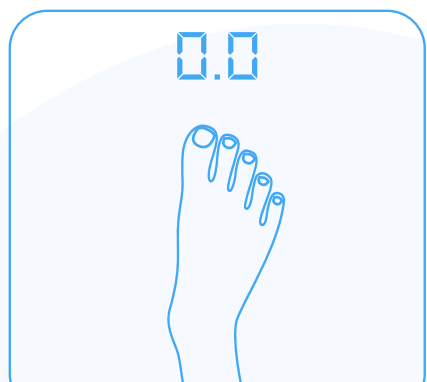

¡Vamos!

4. Peso en

Una vez que la pantalla indique "0.0", sube a la báscula para pesarse.

Cuando aparezca su peso, baja de la báscula.

Se formará un cuadro rayado que indica el progreso de la medición que se envía a su médico.



¿Desea hacer más?
Descargue nuestra aplicación gratuitamente.



Busque "CareSimple" en App Store o bien en Google Play store.



App Store



Play Store

Esta aplicación es opcional y le permite:

- Comunicarse con su doctor
- Consultar los resultados
- Ver su plan de cuidados